



MASQUES Barrière UNS1

Catégorie 1 à usage des professionnels Grand Public
Le masque barrière est conçu pour être réutilisable

Masque dit "alternatif" à usages non sanitaires selon la circulaire interministérielle du 29.03.2020, testé par la DGA



La durée de port doit être inférieure à 4 heures.
Pour une première utilisation ou une réutilisation de masque,
s'assurer que celui-ci ait bien été lavé au préalable.

Il convient de ne pas le mettre
en position d'attente sur le front ou sous le menton
pendant et après utilisation.

Modèle UNS1 réf : AFN

- 2 couches de tissus 100% coton bio fil certifié GOTS,
- 1 face extérieure polyamide
- 1 Barrette nasale
- Filtration 94%

La respirabilité est 3 X fois supérieure à la norme.

Il a reçu un traitement antibactérien pour des raisons hygiéniques, notamment pour éviter les odeurs suite à l'humidité de la respiration.

Entretien du masque : le laver quotidiennement à 60°C conçu pour être lavé au moins **50 fois** avec un détergent classique sans assouplissant suivant un cycle de 30 minutes Pas de séchage à l'air libre




Élastiques
Derrière les oreilles



Brides



Élastiques
Derrière la tête

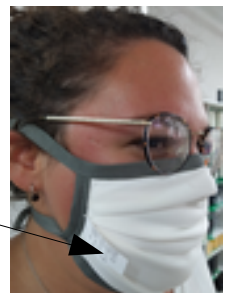

Étiquette
à l'extérieur